

# Die 8 wichtigsten Fragen rund um den **DALLMER** CLOG



**1 Für welche Pferdehufe eignet sich der DALLMER CLOG?**

Der Einsatz von Clogs setzt eine normale Hufstellung voraus (Zehenwandwinkel 48°-52° vorn, 55°-59° hinten).

**2 Wo und wann kann der DALLMER CLOG eingesetzt werden?**

Der Clog eignet sich zum Reiten und Fahren barfußgehender Pferde in gemäßigtem Gangarten auf festem Untergrund. Außerdem kann der Clog z.B. wie ein Reserverad beim Auto in der Satteltasche auf Wander- und Distanzritten und in der Ersatzteilkiste mit Spikes für Kutschfahrten auf seinen Einsatz warten.

**3 Wie lange hält der DALLMER CLOG?**

Dies hängt ganz von der Häufigkeit der Nutzung und des Untergrundes, auf dem er eingesetzt wird, ab. Langzeittests zeigen, dass (bei gleichmäßiger Abnutzung) eine Laufleistung von 600-1000 km durchaus erreicht wird.



Ursula Lüthi und Marion Landert auf ihrem 2000 km-Ritt von Zürich nach Finnland, bei dem sie nur einmal (nach 1200 km) die Clogs wechselten.

**4 Aus welchem Material ist der DALLMER CLOG?**

Für den DALLMER CLOG wird ein elastischer, widerstandsfähiger Kunststoff verwendet, der an Festigkeit dem natürlichen Horn fast gleich kommt. Die stoßdämpfende Eigenschaft wirkt sich vorteilhaft auf Sehnen und Gelenke aus.

**5 Wie wird der DALLMER CLOG montiert?**

Der mitgelieferte Kunststoffsteg wird entsprechend der Hufbreite gekürzt und zwischen den Clogschenkeln mit Schrauben sicher fixiert. Dann werden die Gurte so eingestellt, dass der Ballenhalter die Ballen zentral umschließt.

**6 Welches Zubehör kann zusätzlich eingesetzt werden?**

Auf Wunsch können für den DALLMER CLOG gegen Aufpreis zusätzlich Einlegesohlen (z.B. gegen groben Untergrund oder Schneestellung) erworben werden oder Spikes mit Widia zum Gleitschutz eingesetzt werden. Ein weiterer Zusatzartikel ist der Ballenschoner, der bei Verletzungen, Mauke, etc. den Ballenbereich zusätzlich schützt.



Clog mit Ballenschoner




Clog mit Spikes

**7 In welchen Größen ist der DALLMER CLOG erhältlich?**

Es stehen vier verschiedene Größen zur Verfügung: (siehe Grafik)

Zur Größenbestimmung stellt man den Huf (etwa 2 Wochen nachdem der Huf das letzte Mal ausgeschnitten worden ist) am besten auf ein Stück weichen Karton (während man den anderen Huf zum Druckaufbau anhebt), zeichnet diesen Abdruck mit einem Stift nach und misst anschließend die breiteste Stelle des Hufs.

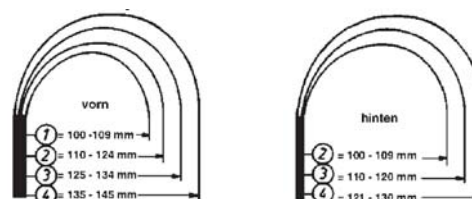

**8 Was kostet der DALLMER CLOG und welche Ersatzteile sind verfügbar?**

Art-Nr.	Artikel	Hufweite in mm	Preis in €/Paar
980066	DALLMER Clog Größe 1	100-109 mm Vorderhand	120,40
980067	DALLMER Clog Größe 2	110-124 mm Vorderhand	120,40
980072	DALLMER Clog Größe 2	100-109 mm Hinterhand	120,40
980068	DALLMER Clog Größe 3	125-134 mm Vorderhand	120,40
980073	DALLMER Clog Größe 3	110-120 mm Hinterhand	120,40
980069	DALLMER Clog Größe 4	135-145 mm Vorderhand	120,40
980074	DALLMER Clog Größe 4	121-130 mm Hinterhand	120,40
980202	Einlegesohlen gegen Schneestellung (Paar)		10,30
980200	Gleitschutz: 12 Spikes mit Widia (Paar)		13,30
980077	Ballenhalter (Paar)		37,00
980079	Ballenschoner		13,30
980195	Spannband (Stück)		3,50

Unverbindliche Preisempfehlungen