

Damit es immer weitergeht ...

DALLMER

CLOG



DALLMER GmbH + Co. KG · Abt. Hufschuhe · Alte Landstrasse 3 · D-21376 Salzhausen-Putensen
Tel. 04172 5100 · Fax 04172 7294 · www.dallmer.de · hufschuh@dallmer.de

Auch aus dem Hause
DALLMER:



DALLMER Fohlenschuhe



DALLMER Cuff



DALLMER Hufeisenformer




Damit es immer weitergeht ...

DALLMER CLOG DBP u. Ausl.-Pat.

Für alle unvorhergesehenen Hufprobleme auf Distanzritten, während des Turniers und nicht zuletzt ein Bandagensersatz beim Pferdetransport. Von großem Vorteil ist der elastische Kunststoff, der es erlaubt, mit vier Größen die Hufweiten aller Pferderassen zu versorgen.

Die Verwendung der Schuhe setzt eine normale Hufstellung voraus (Zehenwandwinkel 48° - 55°).

Durch die Schnallung steht der Huf unter Spannung. Daher muss der Clog nach der Arbeit sobald als möglich gelöst werden. Für Weidegang etc. sind die Clogs nicht geeignet.

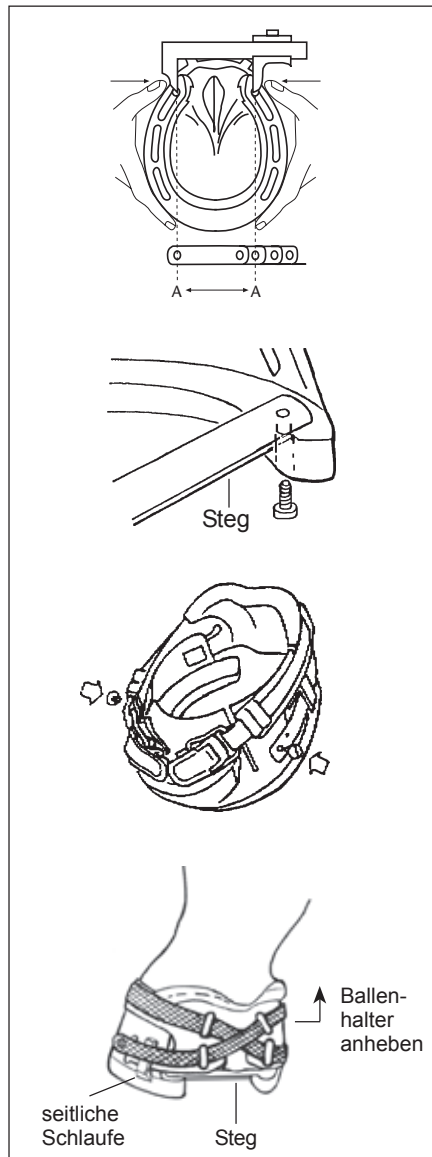

Befestigungsanleitung der Clogs

Der DALLMER Clog besteht aus einem Kunststoffschuh mit Gurten, Ballenhalter und einem Steg mit Schrauben zur Fixierung der Clogschenkel entsprechend der Hufbreite A – A

Bei entsprechender Ermittlung A – A finden Sie in den mitgelieferten Kunststoffstegen das passende Loch. Rest rund abschneiden.

Der Steg muss verschraubt werden, wie die Zeichnung zeigt.

Damit der Clog satt am Huf anliegt, muss der Hufrand – besonders im Zehenbereich – gut angerundet werden.

Den geöffneten Schnallenschuh so weit auf den Huf schieben, bis die Hufzehe in der Schuhspitze anliegt. Die Länge beider Gurte so einstellen, dass der gepolsterte Ballenhalter die Ballen zentral umschließt. Den Ballenhalter reichlich anheben, die Drahtschlaufen einhängen und dann die Schnallen schließen.

Wenn der Schuhrand am Kronenrand scheuert, muss die Schuhwand gekürzt werden.

Bei sehr flacher Sohle kann das Durchziehen der Spanngurte durch die seitlichen Schlaufen den Halt verbessern.

Wichtig:

Nach wenigen Minuten und einigen Schritten den Clog auf richtigen Sitz prüfen. Sollte der Ballenhalter nach unten abgerutscht sein, muss er angehoben und nachgespannt werden.

Größen-Skala

Größe	Hufweite in mm	
	Vorderhand	Hinterhand
1	100 - 109	-
2	110 - 124	100 - 109
3	125 - 134	110 - 120
4	135 - 145	121 - 130

Als **Sonderzubehör** sind lieferbar:

- **Ballenschoner** zum Schutz der Fesselbeuge
- Für den Wintereinsatz sind **Einlagen** gegen Schneestellung und **Spikes** lieferbar. Für diese Spikes sind Bohrungen in der Schuhsohle vorbereitet. Vor dem Eindrücken der Spikes den Clog erwärmen.

Benutzte Schuhe können nicht zurückgenommen werden!